

Sanmedi Circumani verwisselen koolstoffilter

Geurafzuiging

Verwisselen koolstoffilter

Om de geurafzuiging optimaal te laten functioneren, dient het koolstoffilter regelmatig vervangen te worden. Een koolstoffilter gaat bij normaal gebruik ongeveer een half jaar mee.

- 1. Trek de houder voor het koolstoffilter eruit.



- 2. Gooi het oude koolstoffilter weg
- 3. Plaats een nieuw koolstoffilter



- 4. Plaats de houder terug en sluit deze

