

SANMEDI CIRCUMANI

6000+ / 6100+ / 6200+ / 6300+

closetzitting met onderdouche, föhn
en geurafzuiging



GEBRUIKSAANWIJZING

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING

De Sanmedi Circumani is een hygiënische closetzitting met geïntegreerde onderdouche, warme luchtdroging en geurafzuiging, inclusief afstandsbediening.

De Sanmedi Circumani wordt uitsluitend geleverd met de bedieningsunit aan de rechterzijde van de zitting.

DE LEVERING OMVAT:

De Sanmedi Circumani closetzitting met onderdouche, föhn, geurafzuiging en afstandsbediening bestaat uit de volgende onderdelen:

- Basiseenheid met knoppenpaneel, waterverwarmer, onderdouche, föhn, geurafzuiger, elektronische besturing en ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen die voldoet aan de Kiwa-eisen voor waterleidingtechnische veiligheid.
- Zitting
- Deksel
- Afstandsbediening
- Flexibele aanvoerslang
- Ballofix afsluiter voor montage in de watertoevoer + vuilfilter
- Bevestigingsset
- Plastic servicekapje
- 1 set à 4 stuks zittingbuffers. 2 x 6 mm en 2 x 8 mm.
- geurfilter
- Installatiehandleiding
- Gebruiksaanwijzing



TECHNISCHE GEGEVENS


Elektrische aansluiting	230 V
Aansluitwaarde	850 W
Standby waarde	0,9 / 6,7 (indien de boiler opwarmt) W
Spanning	230 V, 50-60 Hz
Netsnoer	2.00 m
Watertemperatuur	10°C tot 39°C, regelbaar
Warmeluchttemperatuur	20°C tot 45°C, regelbaar
Wateraansluiting	links 3/8", flexibele slang 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2"afsluiter bijgeleverd en keerklep
Waterdruk	toepassingsgebied 1 - 10 bar
Water toevoer	1,7 – 3 liter / min.
Kleur	wit
Gewicht	6,3 kg
Richtlijnen	laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3
Drinkwaterbeveiliging	speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid.

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing

OVERZICHT VAN DE PICTOGRAMMEN




1. bedieningspaneel
2. herkenningssoog
3. houder koolstoffilter
4. netschakelaar
5. föhn
6. douchearm
7. closetzitting en deksel met softclosewerking
8. boileraftapschroef
9. typeplaatje met serienummer
10. reservedouchekop
11. wateraansluiting 3/8"

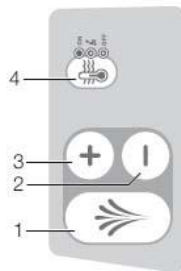

Vast bedieningspaneel

1. onderdouches (aan/uit) en stopknop
2. straalsterkte (-)
3. straalsterkte (+)
4. boilerstatusindicator met blauw led

- D Display
 D1 Temperatuur douche en föhn
 D2 Föhn temperatuur
 D3 Servicemelding
 D4 Instelling boiler
 D5 Geurafzuiging (aan/uit)
 D6 Föhn (aan/uit)
 D7 Douche positie (voor/achter)
 D8 Oscillerende douche (aan/uit)
 D9 Massagestraal (aan/uit)
 D10 Douchestraalsterkte
 D11 Foutmelding

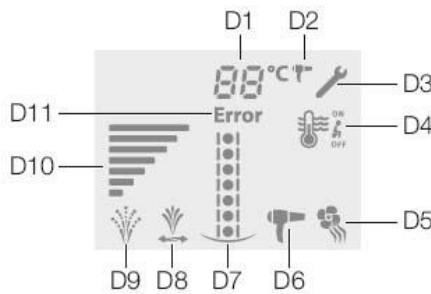


Afstandsbediening

Standaard fabrieksinstelling:

- 1 onderdouches 37° C
- 2-3 straalsterkte stand 3 van 7
- 12 vaginale onderdouches stand 7 van 7
- 5 föhn na sproeien aan 45° C
- 4 geurafzuiging aan

- 1 Douche (start/stop) en stopknop
- 2 Douchestraalsterkte - zachter
- 3 Douchestraalsterkte + harder
- 4 Geurafzuiging (aan/uit)
- 5 Föhn (aan/uit)
- 6 Oscillerende douche (aan/uit)
- 7 Douche positie (voor/achter)
- 8 Service
- 9 Temperatuur douche/föhn
- 10 Boiler temperatuur (aan/uit/ aan bij zitten gaan)
- 11 Massagestraal (aan/uit)
- 12 Vaginale douche (aan/uit)

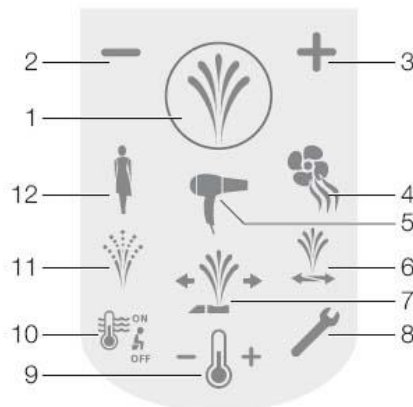

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing

SPOELEN EN DROGEN



Om stringen en beschadigingen te voorkomen s.v.p. de volgende aanwijzingen opvolgen:

- de onderdouche of luchtopening voor föhn of afzuiging niet besproeien met urine of verontreinigen met fecaliën
- niet op de zittingdeksel gaan staan of zitten of de deksel als rugleuning gebruiken


In de ruststand is de onderdouche onder de zitting verborgen. Bij zowel het naar buiten schuiven als bij het terugschuiven, wordt de douchekop automatisch gereinigd.

SPOELEN:


- Neem plaats op de closetzitting, de geurafzuiging zal na enkele seconden automatisch in werking treden.
- Blijf zitten en druk de douchetoets in. De douchekop reinigt zichzelf en gaat naar de douchestand. Het onderlichaam wordt nu gereinigd met warm water.
- De onderdouche geeft ca. 20 seconden water en gaat dan automatisch terug, naar de oorspronkelijk positie en reinigt zichzelf kort.
- De föhn schakelt hierna automatisch in.
- Sta van het toilet op om het föhnen te beëindigen.
- De stoptoets kan altijd gebruikt worden om elke functie direct te stoppen.




herkenningsoog

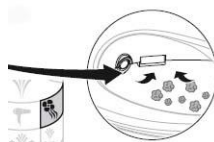

geurafzuiging gaat automatisch aan

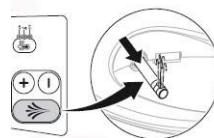

druk de douchetoets in

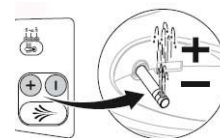








regel de straalsterkte met de +/- toetsen

GEBRUIK AFSTANDBEDIENING:




De functies op het vaste bedieningspaneel zijn ook te bedienen via de afstandsbediening. Daarnaast zijn meerdere functies hiermee te bedienen of voor langere periode in te stellen.

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing

INSTELLING SPECIALE FUNCTIES:

	<p>Om de speciale functies te kunnen gebruiken, het afdekkapje naar onderen schuiven. Activeer de afstandsbediening door één keer op een willekeurige toets te drukken. De afstandsbediening wordt tien minuten na gebruik automatisch weer uitgeschakeld.</p>
	<p>Douche Druk op deze toets om de onderdouche in werking te zetten. Deze zal eerst de onderdouche met water reinigen voordat deze volledig naar buiten komt en gaat sproeien. Na 20 seconden zal de onderdouche stoppen, zich terugtrekken en reinigen. Tussentijds stoppen kan door opnieuw de stopknop in te drukken.</p>
	<p>Straalsterkte Door op de min of de plus toets te drukken kan tijdens het douchen de sterkte van de straal zachter of harder worden gezet, zowel voor de standaard onderdouche als voor de maternity onderdouche. Er zijn 7 niveaus mogelijk.</p>
	<p>Maternitydouche Druk op deze toets om deze onderdouche in werking te zetten. Deze zal eerst de onderdouche met water reinigen voordat deze volledig naar buiten komt en gaat sproeien. Na 20 seconden zal de onderdouche stoppen, zich terugtrekken en reinigen. Tussentijds stoppen kan door opnieuw de stopknop in te drukken.</p>
	<p>Föhn Druk op deze toets om het drogen te starten of te stoppen. Tijdens het drogen koelt de lucht geleidelijk af om tegemoet te komen aan het temperatuurgevoel van de huid.</p>
	<p>Geurafzuiging Met deze toets kan de geurafzuiging aan of uit gezet worden.</p>
	<p>Massagestraal Door voor of tijdens het gebruik van de onderdouche op deze knop te drukken wordt de massagestraal geactiveerd. De pulserende straal stimuleert de darmactiviteit.</p>
	<p>Douchepositie Met behulp van deze toets kan de positie van de anale- en vaginale douche worden ingesteld. In totaal kan de positie 7 niveaus naar achter en naar voren worden geplaatst.</p>

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing


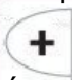
	<p>Oscillerende douche Door op deze toets te drukken beweegt de douchearm naar voren en weer terug. Dit verbetert de reinigende werking van de douche.</p>
	<p>Temperatuurinstelling water en warme luchtdroging Door op de plus of de min te drukken kan de gewenste temperatuur van het water worden ingesteld. Tijdens het douchen zal de temperatuur na verloop van tijd langzaam afnemen en uiteindelijk koud worden. Het is goed voor uw lichaam om net zolang te sproeien tot het water koud is. Om het sproeien te onderbreken kunt u op de stopknop drukken. Om de temperatuur van de föhn in te stellen, dient eerst de föhntoets ingedrukt te worden. Kies daarna het min- of plus- teken om de temperatuur te wijzigen.</p>
	<p>Servicetoets Voor handmatige reiniging / wisselen van de onderdouche. Druk deze toets in om de onderdouche naar voren te brengen zonder hem in gebruik te stellen. Zorg er hierbij voor dat u het herkenningsoog niet afdekt. Voor meer informatie hierover, zie "reinigen douchekopje".</p>

Wijzigen standaard-instellingen

Onderstaande instellingen kunnen worden gewijzigd:

- Sterkte douchestraal
- Watertemperatuur
- Geurafzuiging (aan/uit)
- Positie onderdouche
- Föhntemperatuur
- Pulserende massagedouche (aan/uit)
- Douchebereik (aan/uit)

Wijzigingen van instellingen **vastleggen** via de afstandsbediening:



1. De instelling (bijv. temperatuur van de föhn) aanpassen door föhn-toets in te drukken en met + of – toets aanpassen naar de gewenste temperatuur.
2. Sleuteltoets (8)  en toets "+" (3)  tegelijkertijd gedurende ca. 2 seconden ingedrukt houden. Een blauw lampje knippert éénmalig ter bevestiging op het bedieningspaneel naast de closetzitting.

Resultaat:

De nieuwe instellingen zijn vastgelegd.

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing

Terugzetten naar fabrieks-instellingen

Sleuteltoets (8)  en de aan/uit toets van de boiler temperatuur  (10) tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt houden. Een blauw lampje knippert éénmalig ter bevestiging op het bedieningspaneel.

Resultaat:

Functies zijn weer ingesteld op de standaard fabrieks-instellingen.

NB: Wijzigingen in de instellingen blijven behouden zolang men van het toilet gebruik maakt. Indien deze wijzigingen niet worden vastgelegd op de hierboven vermelde manier, worden de "oude" instellingen weer hersteld zodra men opstaat en de volgende keer plaatsneemt op het toilet.

STORING:

Storing	Oorzaak	Oplossing
Geen werking van het apparaat	Stekker zit niet in het stopcontact Aardlekschakelaar is uitgeslagen of stop is stuk Zekering in de elektrische verdeler is stuk Herkenningsoog is vuil	Steek de stekker in het stopcontact Zet de knop van de aardlekschakelaar om of vervang de stop Vervang de zekering Maak dit met een zachte doek schoon
Afstandsbediening functioneert niet (geen symbolen zichtbaar op het display)	Batterijen zijn leeg Geen batterijen aanwezig Batterijen zijn er verkeerd ingedaan Afstandsbediening is defect	Vervang de batterijen (afstandsbediening naast de Circumani houden) Stop batterijen (3 x 1,5V type LR3/ AAA) in de afstandsbediening (afstandsbediening naast de Circumani houden) Batterijen er opnieuw indoen (afstandsbediening naast de Circumani houden) Vervang de afstandsbediening
Watertemperatuur te laag	Boilertemperatuur niet ingeschakeld Te korte opwarmtijd van de boiler bij gebruik zittingcontact	Stel de boiler temperatuur d.m.v. de functie op de afstandsbediening in Stel de boiler temperatuur d.m.v. de functie op de afstandsbediening in door op "on" te drukken
Douchestraal te zwak	Straalsterkte te laag ingesteld Onderdouche verstopt of verkalkt	Verhoog de straalsterkte door de toets (3) op de afstandsbediening of op het display in te drukken Druk de sleuteltoets (8) in om douchekopje te reinigen of te wisselen

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing

Föhn gaat niet aan na gebruik onderdouche	Functie automatisch föhnen is gedeactiveerd	Druk de toets voor de föhn (5) op de afstandsbediening in; functie "automatisch föhnen" hierna activeren
Föhn temperatuur is niet comfortabel	Föhn temperatuur is te hoog of te laag ingesteld	Temperatuur aanpassen via de toets op de afstandsbediening
Geurafzuiging werkt niet	Functie automatisch inschakelen geurafzuiging is gedeactiveerd	Druk de toets voor de geurafzuiging (4) in; functie "automatische geurafzuiging" hierna activeren
Er stroomt water uit de onderkant	Er is een lekkage	Stekker uit het stopcontact halen en de servicedienst inschakelen
Het blauwe ledje op de douche-wc brandt (en het teken "error" op de afstandsbediening)	De douche-wc is door een veiligheidselement uitgeschakeld	Stekker 20 seconden uit het stopcontact halen om het apparaat te "resetten"

Indien de douche-wc nog niet functioneert, neem dan contact op met uw leverancier.

ONDERHOUD:

Douchekopje

- 1. Druk de sleuteltoets (8) op de afstandsbediening in (het herkenningsoog mag niet afgedekt zijn). De douche-arm komt naar voren zonder water te sproeien.



- 2. Ondersteun met een hand het douche-armpje en trek met de andere hand voorzichtig het douchekopje eruit.
- 3. Douchekopje schoonspelen en ontkalken of vervangen voor een nieuwe.
- 4. Druk de sleuteltoets (8) weer in. De douche-arm trekt zich in de uitgangspositie terug (zonder te sproeien).
- 5. Reinig de opening van de onderdouche
- 6. Druk wederom op de sleuteltoets (8).
- 7. Plaats nu het schoongemaakte of het nieuwe douchekopje
- 8. Druk op de sleuteltoets (8).

Zitting en deksel

Onderhoud: Gebruik alleen zachte zeepproducten en beslist geen bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende producten.

De zitting en deksel zijn niet vaatwasmachine bestendig.

- Maak de zitting en deksel schoon met een zachte vochtige doek
- Droog de zitting, deksel en scharnieren na met een zachte doek om watervlekken te voorkomen

Monteren / demonteren zitting en deksel

- 1. Klap de zitting en deksel omhoog en schuif beide bevestigingsscharnieren naar buiten.



- 2. Til zitting en deksel van de douche-wc



- 3. Plaats zitting en deksel bij montage weer in de bevestiging en schuif beide scharnieren naar binnen.



- 4. Sluit zitting en deksel.

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing

Geurafzuiging

Verwisselen koolstoffilter

Om de geurafzuiging optimaal te laten functioneren, dient het koolstoffilter regelmatig vervangen te worden. Een koolstoffilter gaat bij normaal gebruik ongeveer een half jaar mee.

- 1. Trek de houder voor het koolstoffilter eruit.



- 2. Gooi het oude koolstoffilter weg
- 3. Plaats een nieuw koolstoffilter




- 4. Plaats de houder terug en sluit deze



Batterij van de afstandsbediening wisselen

Het is belangrijk om de batterij binnen enkele meters van de douche-wc te verwisselen in verband met de herkenning van de afstandsbediening.

- Schuif het afdekkapje van de afstandsbediening naar beneden en leg 3 batterijen (penlight AAA/Type 1,5V) in de afstandsbediening. Volg hierbij de tekenjes in het apparaat.

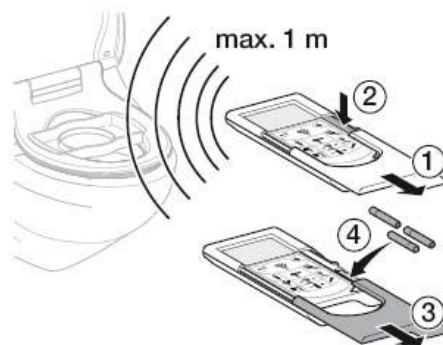


Let op!!

Demonteren van de Circumani

!!! Bij het demonteren van de Sanmedi Circumani dient het reservoir eerst leeg gemaakt te worden, om schade aan de printplaten te voorkomen.

- 1. Sluit de watertoevoer af (ballofix dichtdraaien)
- 2. Trek de stekker uit het stopcontact
- 3. Plaats een opvangbak onder de douche-wc
- 4. Draai de schroef onder de boiler een kwartslag open met een grote schroevendraaier of muntstuk en verwijder deze

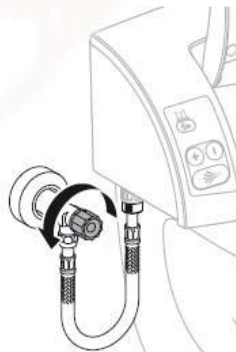

- 5. Laat de boiler leeglopen
- 6. Herplaats de schroef weer en draai deze vast

SERVICE

Bij normaal gebruik heeft de Sanmedi Circumani de eerste jaren van gebruik geen onderhoud nodig. Wanneer de Sanmedi Circumani niet goed functioneert of de onderdouche is vervuild door bijvoorbeeld kalkaanslag, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met Sanmedi bv Uitgeest, telefoonnummer 0251-316482.

GARANTIE

Sanmedi bv verbindt zich ertoe binnen een periode van 1 jaar vanaf de factuurdatum materiaal- en fabricagefouten te verhelpen.

Het verhelpen van storing onder garantie vindt uitsluitend plaats, indien aan de garantievoorwaarden van Sanmedi bv wordt voldaan. De garantie heeft geen betrekking op fouten of beschadigingen die een direct of indirect gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde bediening, misbruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, foutieve montage of demontage. De garantie dekt geen fouten of beschadigingen die een andere oorzaak hebben dan materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt evenmin gevolgschade, d.w.z. schade aan andere zaken, die het product in verband met een eventueel ongeval veroorzaakt.

Om aanspraak te maken op garantie dient u contact op te nemen met de servicedienst van Sanmedi bv Uitgeest, telefoonnummer 0251-316482. Bij het uitvoeren van reparatie onder garantie dient vooraf een aankoopfactuur te worden overlegd.



De deksel van de Sanmedi Circumani closetzitting is decoratief en niet gemaakt om op te staan of zitten of als rugleuning te gebruiken! Schade aan de deksel van de Sanmedi Circumani closetzitting als gevolg van het staan of zitten op de deksel of als gevolg van het gebruik als rugleuning valt derhalve buiten de garantie.

SYMBOLLEN, KEURMERKEN, CERTIFICERINGEN



Richtlijnen

laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3

Drinkwaterbeveiliging

speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid.