

SANMEDI CIRCUMANI

6000+ / 6100+ / 6200+ / 6300+

closetzitting met onderdouche, föhn
en geurafzuiging



**GEBRUIKSAANWIJZING
AFSTANDBEDIENING**

GEBRUIK AFSTANDSBEDIENING:




Voor een duidelijker overzicht worden de toetsen die weinig gebruikt worden verborgen onder een wegschuifbaar afdekkapje.




Indien u de vereenvoudigde afstandsbediening met licht te bedienen padderstoelknoppen heeft, bevindt het uitgebreide bedieningspaneel zich aan de achterzijde binnen in de behuizing. Open de behuizing door de 4 schroefjes aan de achterzijde los te draaien en het deksel te verwijderen.

- D Display
- D1 Temperatuur douche en föhn
- D2 Föhn temperatuur
- D3 Servicemelding
- D4 Instelling boiler
- D5 Geurafzuiging (aan/uit)
- D6 Föhn (aan/uit)
- D7 Douche positie (voor/achter)
- D8 Oscillerende douche (aan/uit)
- D9 Massagestraal (aan/uit)
- D10 Douchestraalsterkte
- D11 Foutmelding

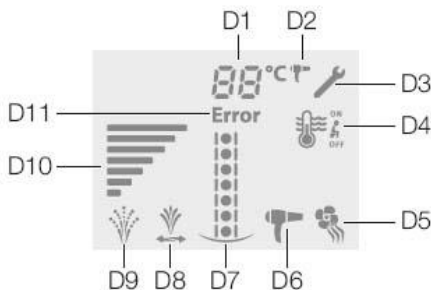

- 1 Douche (start/stop) en stopknop
- 2 Douchestraalsterkte - zachter
- 3 Douchestraalsterkte + harder
- 4 Geurafzuiging (aan/uit)
- 5 Föhn (aan/uit)
- 6 Oscillerende douche (aan/uit)
- 7 Douche positie (voor/achter)
- 8 Service
- 9 Temperatuur douche/föhn
- 10 Boiler temperatuur (aan/uit/ aan bij zitten gaan)
- 11 Massagestraal (aan/uit)
- 12 Vaginale douche (aan/uit)

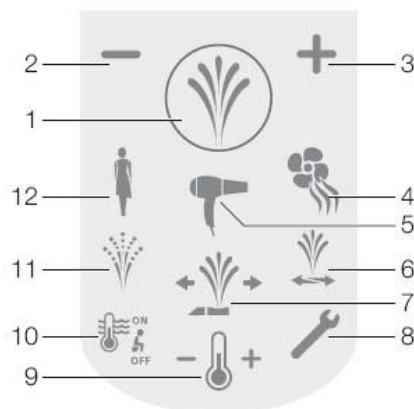








Afstandsbediening

Standaard fabrieksinstelling:



- 1 onderdouche 37° C
- 2-3 straalsterkte stand 3 van 7
- 12 vaginale onderdouche stand 7 van 7
- 5 föhn na sproeien aan 45° C
- 4 geurafzuiging aan

Sanmedi Circumani gebruiksaanwijzing afstandsbediening

INSTELLING SPECIALE FUNCTIES:

	<p>Om de speciale functies te kunnen gebruiken, het afdekkapje naar onderen schuiven. Activeer de afstandsbediening door één keer op een willekeurige toets te drukken. De afstandsbediening wordt tien minuten na gebruik automatisch weer uitgeschakeld.</p>
	<p>Douche Druk op deze toets om de onderdouche in werking te zetten. Deze zal eerst de onderdouche met water reinigen voordat deze volledig naar buiten komt en gaat sproeien. Na 20 seconden zal de onderdouche stoppen, zich terugtrekken en reinigen. Tussentijds stoppen kan door opnieuw de stopknop in te drukken.</p>
	<p>Straalsterkte Door op de min of de plus toets te drukken kan tijdens het douchen de sterkte van de straal zachter of harder worden gezet, zowel voor de standaard onderdouche als voor de maternity onderdouche. Er zijn 7 niveaus mogelijk.</p>
	<p>Maternitydouche Druk op deze toets om deze onderdouche in werking te zetten. Deze zal eerst de onderdouche met water reinigen voordat deze volledig naar buiten komt en gaat sproeien. Na 20 seconden zal de onderdouche stoppen, zich terugtrekken en reinigen. Tussentijds stoppen kan door opnieuw de stopknop in te drukken.</p>
	<p>Föhn Druk op deze toets om het drogen te starten of te stoppen. Tijdens het drogen koelt de lucht geleidelijk af om tegemoet te komen aan het temperatuurgevoel van de huid.</p>
	<p>Geurafzuiging Met deze toets kan de geurafzuiging aan of uit gezet worden.</p>
	<p>Massagestraal Door voor of tijdens het gebruik van de onderdouche op deze knop te drukken wordt de massagestraal geactiveerd. De pulserende straal stimuleert de darmactiviteit.</p>
	<p>Douchepositie Met behulp van deze toets kan de positie van de anale- en vaginale douche worden ingesteld. In totaal kan de positie 7 niveaus naar achter en naar voren worden geplaatst.</p>

Sanmedi Circumani gebruiksaanwijzing afstandsbediening



	Oscillerende douche Door op deze toets te drukken beweegt de douchearm naar voren en weer terug. Dit verbetert de reinigende werking van de douche.
	Temperatuurinstelling water en warme luchtdroging Door op de plus of de min te drukken kan de gewenste temperatuur van het water worden ingesteld. Tijdens het douchen zal de temperatuur na verloop van tijd langzaam afnemen en uiteindelijk koud worden. Het is goed voor uw lichaam om net zolang te sproeien tot het water koud is. Om het sproeien te onderbreken kunt u op de stopknop drukken. Om de temperatuur van de föhn in te stellen, dient eerst de föhntoets ingedrukt te worden. Kies daarna het min- of plus- teken om de temperatuur te wijzigen.
	Servicetoets Voor handmatige reiniging / wisselen van de onderdouche. Druk deze toets in om de onderdouche naar voren te brengen zonder hem in gebruik te stellen. Zorg er hierbij voor dat u het herkenningsoog niet afdekt. Voor meer informatie hierover, zie "reinigen douchekopje".

Wijzigen standaard-instellingen

Onderstaande instellingen kunnen worden gewijzigd:

- Sterkte douchestraal
- Watertemperatuur
- Geurafzuiging (aan/uit)
- Positie onderdouche
- Föhntemperatuur
- Pulserende massagedouche (aan/uit)
- Douchebereik (aan/uit)

Wijzigingen van instellingen **vastleggen** via de afstandsbediening:


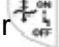
1. De instelling (bijv. temperatuur van de föhn) aanpassen door föhn-toets in te drukken en met + of – toets aanpassen naar de gewenste temperatuur.
2. Sleuteltoets (8)  en toets "+" (3)  tegelijkertijd gedurende ca. 2 seconden ingedrukt houden. Een blauw lampje knippert éénmalig ter bevestiging op het bedieningspaneel naast de closetzitting.

Resultaat:

De nieuwe instellingen zijn vastgelegd.

Sanmedi Circumani gebruiksaanwijzing afstandsbediening

Terugzetten naar fabrieks-instellingen

Sleuteltoets (8)  en de aan/uit toets van de boiler temperatuur  (10) tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt houden. Een blauw lampje knippert éénmalig ter bevestiging op het bedieningspaneel.

Resultaat:

Functies zijn weer ingesteld op de standaard fabrieks-instellingen.

NB: Wijzigingen in de instellingen blijven behouden zolang men van het toilet gebruik maakt. Indien deze wijzigingen niet worden vastgelegd op de hierboven vermelde manier, worden de "oude" instellingen weer hersteld zodra men opstaat en de volgende keer plaatsneemt op het toilet.